


Schnellstartanleitung


- (1) Vermeiden Sie vor der Messung innerhalb von 30 Minuten Essen, Rauchen oder Sport.
- (2) Entleeren Sie Ihre Blase und sorgen Sie vor der Messung für mindestens 5 Minuten Ruhe.
- (3) Messen Sie immer den gleichen Arm (im Allgemeinen den linken Arm).

1: Schalte den Strom an

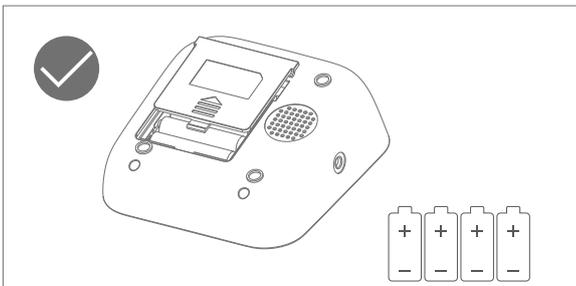




Verwenden Sie 1,5 V „AAA“-Alkalibatterien
(Legen Sie 4 Batterien der Größe „AAA“ ein)

or



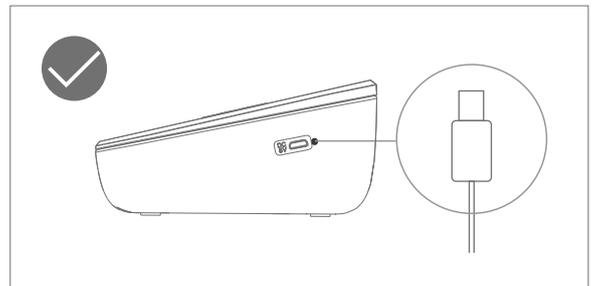


Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an

2: Entfernen Sie den Displayschutz

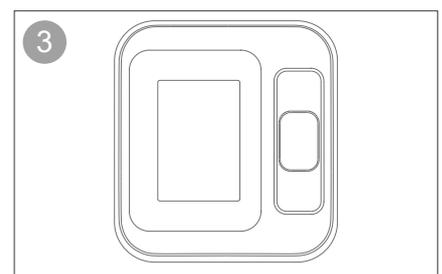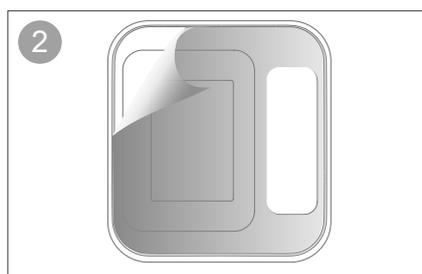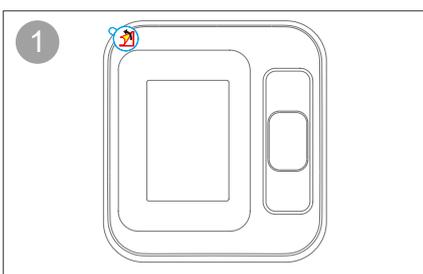



3: Anlegen der Manschette

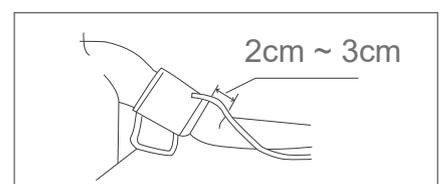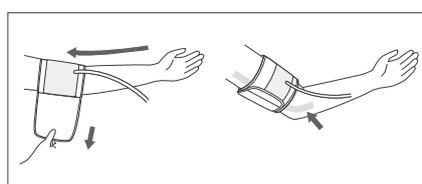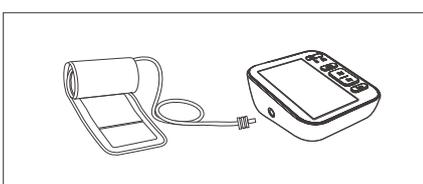

MEDGRAM

4: Messvorbereitung

5: Messung starten

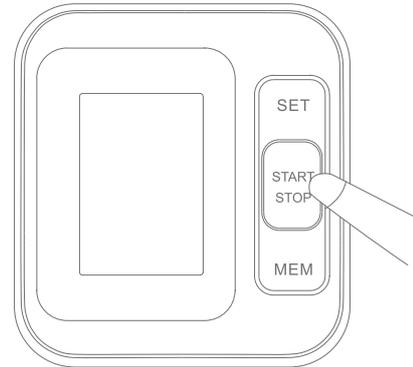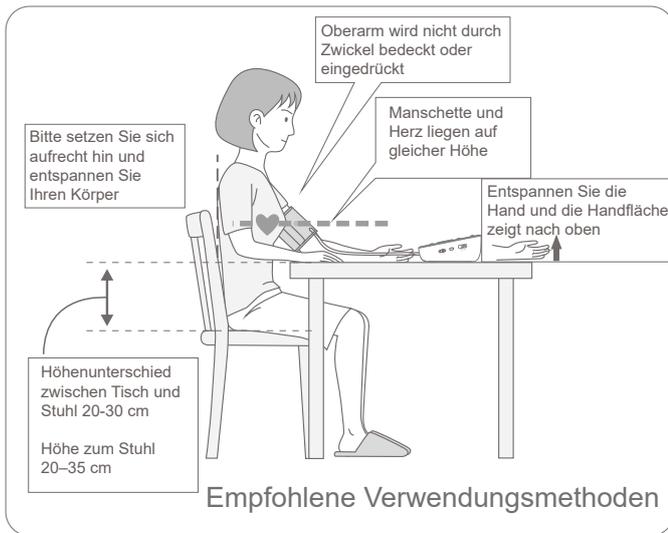

Drücken Sie die Start/Stopp-Taste

Fehler zeigt an

SYMBOL	URSACHE	KORREKTUR
Es erscheint keine Anzeige	Schwache Batterie oder falsche Platzierung	Ersetzen Sie beide Batterien durch neue. Überprüfen Sie die Batterieinstallation auf die richtige Ausrichtung der Batteriepolartitäten.
Er 2	Der Monitor konnte die Pulswelle nicht erkennen oder die Blutdruckdaten nicht berechnen	Überprüfen Sie, ob die Luftabgabe zu langsam ist oder nicht. Wenn es zu langsam ist, überprüfen Sie bitte, ob sich Staub im Schlauchstopfen der Manschette und im Manschettenanschluss im Gerät befindet. Wenn ja, reinigen Sie bitte und starten Sie die Messung erneut. Wenn nein, senden Sie das Gerät bitte an den örtlichen Händler zurück.
Er 4	Too loose cuff or air leakage (Cannot inflate to 30mmHg within 15s)	Tie the cuff correctly and make sure the air plug is properly inserted in the unit
Er 5	Der Luftschlauch ist gecrimpt	Korrigieren Sie es und führen Sie die Messung erneut durch
Er 6	Der Sensor erkennt große Druckschwankungen	Bitte bleiben Sie ruhig und bewegen Sie sich nicht
Er 7	Der vom Sensor erfasste Druck liegt über dem Grenzwert	Bitte senden Sie es an den örtlichen Händler zurück
Er 8	Die Abgrenzung ist falsch oder das Gerät wurde nicht abgegrenzt	Bitte senden Sie es an den örtlichen Händler zurück